

Flow-Safe II EZ[®] CPAP-system

Med innebygd manometer*, sikkerhetsventil og nebulisator

- Integreert trykkmanometer* for kontinuerlig måling av PEEP-trykket, 0 – 25 cmH₂O
- Integreert nebulisator, en slange driver både CPAP og nebulisator. Styres med ON/OFF-bryter
- Sikkerhetsventil som åpnes ved PEEP >25 cmH₂O
- Nylonhette og maske er inkludert
- Kan kombineres med kapnometer (måling av EtCO₂ og pustefrekvens)
- Lavt oksygenforbruk takket være venturiventilen
- Alle produktene er DEHP-frie
- Engangsutstyr



Flowinformasjon/PEEP

Flow liter/minutt	CPAP/PEEP (cmH ₂ O) Nebulisator av	CPAP/PEEP (cmH ₂ O) Nebulisator på
6 liter/min	2,0–3,0	1,0–2,0
10 liter/min	6,0–7,0	2,0–3,0
12 liter/min	8,0–9,0	3,0–4,0
15 liter/min	11,0–12,0	4,0–5,0

CPAP/PEEP (cmH ₂ O)	Flow liter/min Nebulisator av	Flow liter/min nebulisator på
5,0	8–9 liter/min	15–16 liter/min
7,5	10–12 liter/min	19–20 liter/min
10,0	13–14 liter/min	24–25 liter/min
13,0	FLUSH	28–30 liter/min



Art.nr.	Beskrivelse	Forpakning
10-57318	Flow Safe [®] II EZ CPAP, stor voksen med manometer*, overtrykksventil, silikonmaske, pannestøtte, nylonhette og MAX nebulisator	Eske á 5 stk
10-57319	Flow Safe [®] II EZ CPAP, liten voksen med manometer*, overtrykksventil, silikonmaske, pannestøtte, nylonhette og MAX nebulisator	Eske á 5 stk
10-57320	Flow Safe [®] II EZ CPAP, barn med manometer*, overtrykksventil, silikonmaske, pannestøtte, nylonhette og MAX nebulisator	Eske á 5 stk

*Manometerets nøyaktighet er: +/- 3cmH₂O opp til 15 cmH₂O og +/- 5 cmH₂O over 15 cmH₂O

Infiniti Medical AS

Rosenkrantzgt. 75, 3018 Drammen

Tlf: 32 20 10 00, Fax: 32 20 10 01

Email: info@infiniti.no, www.infiniti.no